


## L'utilisation de somnipax guard pour une suroccclusion (rétrognathie mandibulaire)

Si vous souffrez d'une suroccclusion grave, les bandes standards d'une orthèse anti-ronflement peuvent être trop courtes pour vous dans certains cas. En effet, les bandes servent à ajuster l'avancement de la mâchoire inférieure ; si la mâchoire inférieure est naturellement très reculée, même la plus grande longueur de bande la tirerait si loin vers l'avant que cela pourrait réduire votre confort de port.

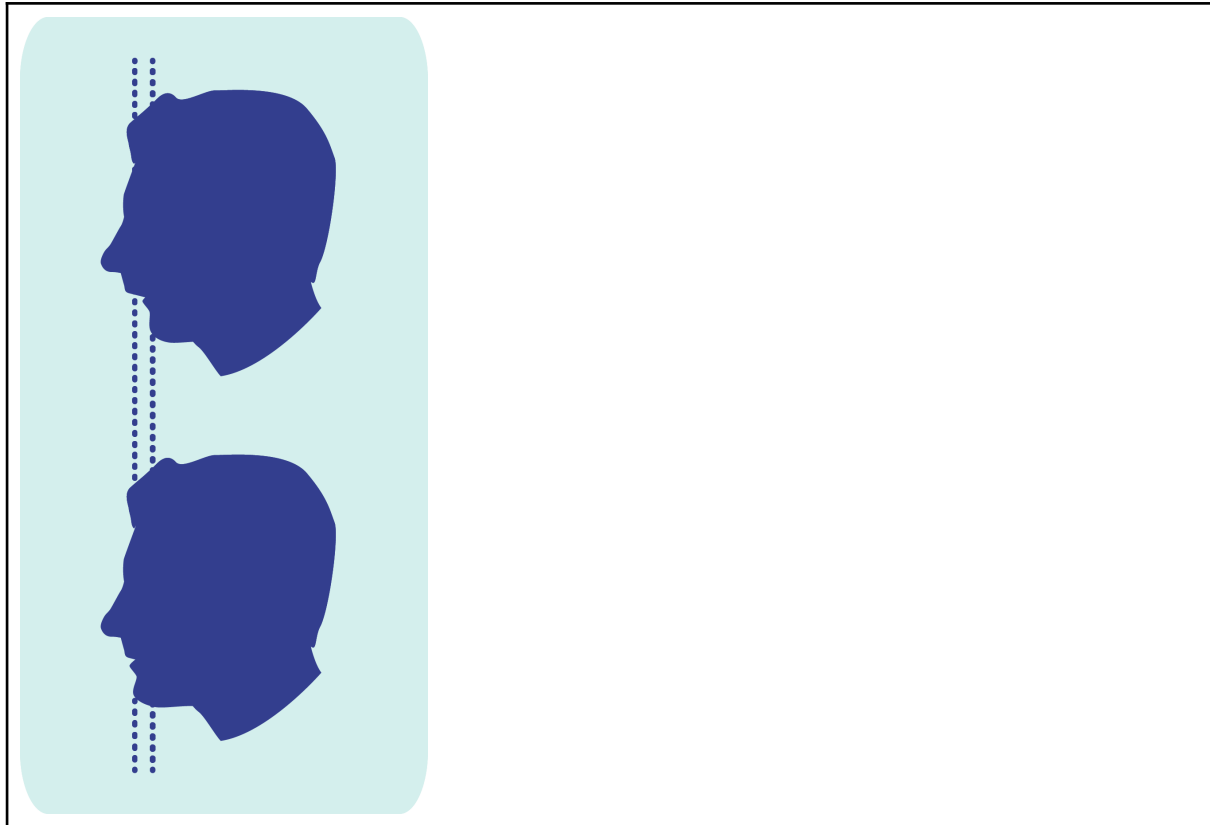

Avec Somnofit, ce problème peut être résolu de manière élégante. Prenez la bande n° 6 (= la bande la plus longue) et coupez-la en deux parties, comme le montre la figure 2. Cela vous donne deux bandes séparées que vous accrochez ensuite, comme d'habitude, au sein du Somnofit (figure 3). Ces bandes sont très longues et font que la mâchoire inférieure n'est que très modérément tirée vers l'avant. C'est la solution idéale pour les personnes souffrant d'une grave suroccclusion.

