

# Löwenstein Medical

## Concentré spécial détartrant



### Détartrant professionnel à l'acide sulfamique

- jusqu'à 6 fois plus économique
  - jusqu'à 6 fois plus puissant
  - jusqu'à 8 fois plus rapide
- ... que les détartrants conventionnels à base d'acide citrique

### Contenu :

500 ml

### Ingrédients conformément au règlement (CE) 648/2004 relatif aux détergents :

< 5 % de phosphates

### Mode d'emploi :

Diluer le concentré avec de l'eau dans une proportion de 1:5 à 1:10 selon le degré de dureté de l'eau utilisée (une part de concentré pour 5 parts de solution à une part de concentré pour 10 parts de solution). Suivre les recommandations du fabricant de l'appareil en matière de détartrage. Ensuite, rincer abondamment à l'eau claire.

### Avertissements :

Se conformer scrupuleusement aux instructions fournies par le fabricant de l'appareil. Éviter tout contact entre le produit (dilué ou non) et les surfaces susceptibles d'être détériorées par les acides (par exemple l'émail, l'aluminium ou le marbre). Vérifier systématiquement la compatibilité du produit au préalable en réalisant un test sur une zone peu visible. Aucune responsabilité ne pourra être acceptée pour d'éventuels dommages résultant d'un usage non conforme. Protéger du gel.

### Informations de sécurité relatives au produit :

H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une grave irritation oculaire. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. P332+P313 En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Fabricant: HOTREGA GmbH, Lorenz-Weber-Straße 2, 36364 Bad Salzschlirf,  
info@hotrega.de